

ATTELLE DE POIGNET

DOMAINE D'APPLICATION

Traumatologie, Rééducation, Rhumatologie, Post-opératoire.

INDICATIONS

Entorse, Tendinite, Arthrose et arthrite, Syndrome du canal carpien, Traitement postopératoire et post- traumatique.

CARACTÉRISTIQUES

- 1 éclisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 éclisses dorsales souples,
- Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables,
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose,
- Boucles anti-vrilles.

COMPOSITION

Tissu principal :

- Couche interne : 80% Coton, 20% Polyester.
- Couche intermédiaire : 100% Polyester.
- Couche externe : 100% Polyester

Tissu de protection zone dorsale : 81% Polyamide, 19% Élasthanne.

Éclisse : Aluminium.



TVA : 5,5%

LPPR : 56,64 € / 7132791

Prise de mesure : Tour de poignet				
Taille	Tour de poignet	Code référent 13	ACL 7	Référence
MODÈLE GAUCHE				
1	19 - 21 cm	8435025930919	6036046	PM0231GA1
2	21 - 23 cm	8435025930926	6036047	PM0231GA2
3	23 - 25 cm	8435025930933	6036048	PM0231GA3
MODÈLE DROIT				
1	19 - 21 cm	8435025930889	6036042	PM0231DR1
2	21 - 23 cm	8435025930896	6036043	PM0231DR2
3	23 - 25 cm	8435025930902	6036044	PM0231DR3

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliaana Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbetsais, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• ATTELLE DE POIGNET

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

- 1.** Desserrer les sangles situées sur la face dorsale de l'attelle. Possibilité de modeler l'éclisse palmaire en fonction de l'angle de flexion souhaité. Pour cela, retirer l'éclisse et la modeler à la forme de la zone palmaire, ou travailler l'éclisse directement dans l'attelle.
- 2.** Insérer la main dans l'attelle en introduisant le pouce dans l'évidement prévu à cet effet. Bien aligner l'éclisse palmaire au milieu du bras et du poignet.
- 3.** Régler la tension des sangles jusqu'à obtention d'un ajustement ferme et confortable puis les fixer avec les sangles auto-agrippantes. Les sangles peuvent être raccourcies pour une meilleure adaptation.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

