

ALTITUDE®

Genouillère ligamentaire articulée réglable



DOMAINE D'APPLICATION

Traumatologie, Post-opératoire, Rééducation.

INDICATIONS

Entorse moyenne à grave des ligaments LLI-LLE, Pré ou Post intervention chirurgicale des LLI-LLE, Réadaptation fonctionnelle : instabilité chronique du genou.

CARACTÉRISTIQUES

Une genouillère ligamentaire articulée réglable :

- Bandes anti-glisses circulaires,
- 2 cadrans articulés réglables par picots en flexion et en extension (0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°),
- 1 éclisse postérieure rigide et amovible,
- 4 sangles de serrage avec boucles à fixation rapide.

COMPOSITION

Polyester 40%, aluminium 35%, polyamide 15%, acrylonitrile butadiène styrène (ABS) 10%.

TVA : 5,5%

LPPR : 102,29 € / 7132785

Prise de mesure : Tour de cuisse Modèle bilatéral				
Taille	Tour de cuisse	Code Référent 13	ACL 7	Référence
1	39 - 47 cm	8435025925502	9775530	GE0111BI1
2	47 - 53 cm	8435025925519	9775547	GE0111BI2
3	53 - 60 cm	8435025925526	9775553	GE0111BI3
4	60 - 67 cm	8435025925533	9775576	GE0111BI4
5	67 - 75 cm	8435025925540	9775582	GE0111BI5

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)
 Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com
 Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbetsais, 35520 La Mézière (France).
 Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

- **ALTITUDE®** Genouillère ligamentaire articulée réglable

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Pour une utilisation avec un angle de flexion ou d'extension, commencer par préparer le réglage de l'attelle : Soulever les caches des cadrans articulés et fixer les cales en fonction de l'angle indiqué sur la prescription médicale. Refermer les caches en les clipsant correctement.
2. Pour une immobilisation totale à 0°, placer l'éclisse rigide (amovible) sur la partie postérieure à l'arrière de la genouillère en retirant les 3 patches auto-agrippants de protection.
3. Ouvrir complètement l'attelle. Repérer l'étiquette « Altitude » pour positionner la genouillère dans le bon sens (logo en haut). Appliquer l'attelle sur la face arrière du genou en prenant soin de positionner les cadrans articulés de part et d'autre de la rotule.
4. Refermer la genouillère autour de la rotule et ajuster la contention. Fixer les 4 sangles à l'aide des boucles de serrage rapide. À chaque fixation de sangle, vérifier que l'attelle ne tourne pas. Ajuster le niveau de maintien à l'aide des sangles auto-agrippantes.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

