

LOMBOBELT ACTIV®

Ceinture de soutien lombaire



TVA : 5,5%

LPPR 21 cm : 46,34 € / 2118674

LPPR 26 cm : 54,85€ / 2132289

DOMAINE D'APPLICATION

Post-opératoire, Rhumatologie, Rééducation.

INDICATIONS

Lombalgie commune aiguë à chronique, lumbago, déficience musculaire, lombarthrose, hernie discale, protrusion discale, sciatique, cruralgie, syndrome sacro-iliaque, stabilisation lombaire, post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 baleines dorsales conformables,
- 2 baleines antérieures souples,
- 4 sangles latérales.

COMPOSITION

- Baleines dos : acier 100%.
- Baleines devant : polypropylène 100%.
- Auto-agrippant : polyamide 100%.
- Velours plastron : polyamide 100%.
- Tissu tulle intérieur : polyamide 73%, élasthanne 27%.
- Tissu élastique côté : élastomère 42%, polyamide 30%, polyester 28%.
- Tissu extérieur dos : polyamide 80%, élasthanne 20%.
- Sangles : polyamide 75%, polyuréthane 25%.

Prise de mesure : TOUR DE TAILLE

Hauteur	Taille	Tour de taille	Code référent 13	ACL 7	Référence
21 cm	1	65 - 75 cm	8435025944633	6394659	TR0237211
	2	75 - 90 cm	8435025944787	6394660	TR0237212
	3	90 - 105 cm	8435025944794	6394662	TR0237213
	4	105 - 120 cm	8435025944831	6394663	TR0237214
	5	120 - 140 cm	8435025944848	6394664	TR0237215
26 cm	1	65 - 75 cm	8435025944589	6394665	TR0237261
	2	75 - 90 cm	8435025944596	6394666	TR0237262
	3	90 - 105 cm	8435025944602	6394667	TR0237263
	4	105 - 120 cm	8435025944619	6394668	TR0237264
	5	120 - 140 cm	8435025944626	6394669	TR0237265

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbets, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• **LOMBOBELT ACTIV®** Ceinture de soutien lombaire

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Détacher les bandes de rappel postural et étirer la ceinture. Repérer l'étiquette Lombobelt Activ® pour positionner la ceinture dans le bon sens. Centrer la ceinture par rapport à votre colonne vertébrale en positionnant deux baleines postérieures de part et d'autre de votre colonne. Le bas de la ceinture doit se positionner sur la base du coccyx.
2. Étirer puis plaquer la ceinture sur votre ventre en la maintenant avec votre main gauche. Positionner la partie droite de la ceinture avec le système de passe-doigts et fixer avec la zone auto-agrippante.
3. Tirer simultanément sur les sangles latérales inférieures, jusqu'au niveau de contention souhaité et les fixer sur le plastron abdominal avec les zones auto-agrippantes. Elles peuvent se superposer l'une sur l'autre.
4. Répéter l'opération pour les sangles latérales supérieures.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

