

3 PANS

Attelle de genou



DOMAINE D'APPLICATION

Traumatologie, Post-opératoire.

INDICATIONS

Traumatisme et entorse, luxation de la rotule, post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES

Une attelle de genou :

- Système de fixations auto-agrippantes de pré-positionnement,
- Modèle adaptable grâce à ses 2 panneaux latéraux amovibles,
- Réglage par sangles avec boucle anti-vrilles,
- Baleines postérieures et latérales modelables.

COMPOSITION

Polyuréthane 46 %, polyamide 18 %, coton 36 %.

Baleines : aluminium 100%.

TVA : 5,5%

LPPR : 57,23 € / 7132727

Prise de mesure : Tour de cuisse + Taille individu – Mesurer le tour de cuisse, jambe en extension à 15 cm au-dessus de la rotule.

Modèle bilatéral

Taille	Hauteur de l'attelle	Tour de cuisse	Taille individu	Code Référent 13	ACL 7	Référence
Pédiatrique	25 cm	28 - 36 cm	< 110 cm	8435025928992	6034697	GE022525U
1 / Enfant	40 cm	33 - 39 cm	110 - 140 cm	8435025929005	6034698	GE022540U
2	50 cm	39 - 46 cm	140 - 160 cm	8435025929012	6034699	GE022550U
3	55 cm	46 - 51 cm	160 - 180 cm	8435025929029	6034700	GE022555U
4	60 cm	51 - 66 cm	180 - 190 cm	8435025929036	6034701	GE022560U
5	66 cm	66 - 75 cm	> 190 cm	8435025929043	6034702	GE022566U

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliaana Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbets, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• 3 PANS Attelle de genou

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Placer correctement l'attelle sur la jambe, l'extrémité la plus large orientée vers le haut.
2. Régler et fixer les panneaux latéraux avec les zones auto-agrippantes.
3. Pré-positionner l'attelle à l'aide des fixations auto-agrippantes (fournies).
4. Ajuster le maintien à l'aide des fixations auto-agrippantes.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

