

BOTIMED® AIR BASSE

Botte de marche



TVA : 5,5%

LPPR : 64,40 € / 7132800

DOMAINE D'APPLICATION

Traumatologie, Post-opératoire.

INDICATIONS

Fracture de la cheville, de la malléole et du cou-de-pied (tarses et métatarses), entorse grave de la cheville, permet un accroissement de la mobilité en post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES

Une botte de marche basse :

- 1 chausson enveloppant matelassé en tissu respirant,
- 1 coque d'immobilisation avec semelle profilée antidérapante en forme de balancier,
- 1 plaque rigide à positionner à l'avant du tibia,
- 1 protège-orteils,
- 1 pompe de gonflage intégrée avec vanne de régulation,
- 1 kit avec 2 coussinets de protection et 1 protège-orteils de rechange.

COMPOSITION

Chausson :

- Tissu en nylon brossé : polyamide 100%,
- Mousse en fibre de polyuréthane : polyuréthane 100%,
- Revêtement : polyester 100%,

Pompe de gonflage :

- Polyuréthane 100%,

Poche d'air :

- Nylon : polyamide 100%,
- Structure : polyuréthane thermoplastique 100%,

Botte :

- Structure : polypropylène 100%,
- Semelle extérieure : polypropylène 100%,
- Semelle intérieure : mousse : éthylène acétate de vinyle 100%,
- Revêtement : Cellulose 100%,
- Système de fermeture : Polyamide 100%, - Rivets : Acier inoxydable 100%.
- Rivets : Acier inoxydable 100%.

Prise de mesure : Pointure.

Modèle bilatéral

Taille	Pointure	Hauteur (cm)	Code Référent 13	ACL 7	Référence
1	34 - 38	21,5	8435025906624	9775501	CP0318BI1
2	38 - 43	23	8435025906631	9775518	CP0318BI2
3	43 - 46	24	8435025906679	9775524	CP0318BI3

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbatais, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• **BOTIMED® AIR BASSE** Botte de marche

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs. Vérifiez l'état avant chaque utilisation. Une semelle cassée ou trop usée peut augmenter le risque de chute. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, cessez d'utiliser le produit et avertissez immédiatement l'établissement de distribution.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

Le port d'une attelle d'immobilisation dont la fonction est de limiter les mouvements rend incompatible la conduite d'un véhicule.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades. Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme, mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

Il est conseillé de placer le produit en position assise et de porter, si possible, une chaussette en coton.

1. Ouvrir entièrement la botte. Insérer le pied à l'intérieur du chausson et le refermer. Si nécessaire, placez les coussinets de protection dans des zones sensibles telles que le cou-de-pied ou les malléoles.
2. Placer le protège-orteils sur le bout du pied. Placer le pied sur la coque d'immobilisation rigide. Fixer la plaque de renfort avant.
3. Refermer la botte grâce au système de fermeture par bandes auto-agrippantes.
4. Ajuster le maintien de façon à ce que l'articulation tibio-tarsienne soit parfaitement immobilisée. S'assurer que l'articulation est maintenue à 90°.
5. Gonfler la poche d'air à l'aide de la pompe intégrée en tournant la valve dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyer plusieurs fois sur la pièce orange jusqu'à obtenir la pression souhaitée.

NOTE : Pour libérer l'air, tourner la valve dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conservé le produit à température ambiante.

