

NEO BOXER®**2^e et 3^e métacarpes**

Attelle de poignets-doigts

**DOMAINE D'APPLICATION**

Traumatologie, Post-opératoire.

INDICATIONS

Fracture des 2e et/ou 3e métacarpes, immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES

Une attelle de poignet-doigts :

- 1 éclisse palmaire amovible modelable,
- 2 éclisses dorsales amovibles modelables permettant d'ajuster le maintien en fonction de la pathologie.
- 1 mini-éclisse de doigts avec fixation auto-agrippante.

COMPOSITION

Extérieur : polyester 100%.

Mousse intérieure : polyester 100%.

Intérieur : coton 100%.

Éclisses : aluminium et polycarbonate 100%.

TVA : 5,5%

LPPR : 79,20 € / 7132762

Prise de mesure : TOUR DE POIGNET Modèle gauche ou droit				
Taille	Tour de poignet (cm)	Code référent 13	ACL 7	Référence
Droit				
1	14 - 16	8435025932739	6018556	PM0511DR1
2	16 - 18	8435025932746	6018558	PM0511DR2
3	18 - 20	8435025932753	6018561	PM0511DR3
Gauche				
1	14 - 16	8435025932760	6018563	PM0511GA1
2	16 - 18	8435025932777	6018564	PM0511GA2
3	18 - 20	8435025932784	6018565	PM0511GA3

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbetsais, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• **NEO BOXER® 2° et 3° métacarpe**

Attelle de poignets-doigts

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Avant de positionner l'attelle Neo Boxer®, former les éclisses dorsales selon l'angle d'immobilisation souhaité du poignet et des 2 doigts. Former également l'éclisse palmaire afin de faire correspondre son inclinaison à celle des éclisses dorsales vous assurant ainsi d'une immobilisation optimale.
2. Enfiler l'attelle en prenant bien soin d'aligner l'éclisse palmaire dans l'axe formé par la paume de la main et l'avant-bras.
3. Serrer la sangle située au niveau du poignet, ajuster la tension au maintien souhaité puis fixer avec la zone auto-agrippante.
4. Serrer la sangle située au niveau de l'avant-bras, ajuster la tension au maintien souhaité puis fixer avec la zone auto-agrippante. Couper les sangles si nécessaire.
5. Former la mini-éclisse de doigts selon l'angle d'immobilisation préalablement choisi pour les éclisses dorsales.
6. Glisser la boucle de protection afin qu'elle soit positionnée au niveau du pli.
7. Décoller et ouvrir les 2 petites languettes auto-agrippantes. Positionner la mini-éclisse au niveau des doigts immobilisés à l'intérieur de la main. Refermer les 2 petites languettes sur la mini-éclisse pour la fixer au niveau de la paume de la main.
8. Serrer enfin la sangle située au niveau des doigts immobilisés et fixer avec la zone auto-agrippante.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

