

CONFORT PLUS® POIGNET

Attelle de poignet



DOMAINE D'APPLICATION

Post-opératoire, Traumatologie, Rhumatologie.

INDICATIONS

Traumatisme du poignet, entorse, contusion, immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES

Une attelle de poignet :

- 1 éclisse palmaire amovible modelable,
- 2 éclisses dorsales souples (repositionnables sur le modèle universel).

COMPOSITION

Extérieur : polyester 100%

Mousse intérieure : polyester 100%.

Intérieur : coton 100%.

Éclisses : aluminium et polycarbonate 100%.

TVA : 5,5%

LPPR : 41,64 € / 7132822

Prise de mesure : Tour de poignet Modèle gauche ou modèle droit				
Taille	Tour de poignet	Code Référent 13	ACL 7	Référence
DROIT				
Pédiatrique	< 10 cm	8435025930728	6032973	PM0229DRP
Enfant	10 - 12 cm	8435025930711	6032972	PM0229DRE
1	12 - 16 cm	8435025930568	6032968	PM0229DR1
2	16 - 18 cm	8435025930605	6032970	PM0229DR2
3	18 - 20 cm	8435025930704	6032971	PM0229DR3
Universelle	> 16 cm	8435025930759	6032974	PM0229DRU
GAUCHE				
Pédiatrique	< 10 cm	8435025930803	6032982	PM0229GAP
Enfant	10 - 12 cm	8435025930797	6032980	PM0229GAE
1	12 - 16 cm	8435025930766	6032977	PM0229GA1
2	16 - 18 cm	8435025930773	6032978	PM0229GA2
3	18 - 20 cm	8435025930780	6032979	PM0229GA3
Universelle	> 16 cm	8435025930810	6032976	PM0229GAU

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbatais, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• **CONFORT PLUS® POIGNET** Attelle de poignet**⚠ PRÉCAUTIONS**

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :**Mise en place pour la taille standard :**

1. Enfiler l'attelle Confort Plus® poignet comme un gant en passant le pouce dans l'évidement prévu à cet effet.
2. Serrer les sangles, ajuster la tension au maintien souhaité puis fixer avec la zone auto-agrippante.

Mise en place pour la taille universelle :

1. Détacher l'éclisse dorsale et enfiler l'attelle Confort Plus® poignet comme un gant, en passant le pouce dans l'évidement prévu à cet effet.
2. Positionner l'éclisse dorsale en veillant bien à ce qu'elle soit alignée dans l'axe poignet/coude et fixer avec la zone agrippante.
3. Pour un positionnement optimal, veiller à ce que l'éclisse dorsale affleure le liseré bleu de l'attelle, côté avant-bras.
4. Serrer les sangles, ajuster la tension au maintien souhaité puis fixer avec la zone auto-agrippante.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

