

ABDOBELT®

Ceinture abdominale



DOMAINE D'APPLICATION

Post-opératoire, Traumatologie.

INDICATIONS

Fracture des côtes (18 et 25 cm), déficience de la paroi abdominale, éventration, post-opératoire, chirurgie de l'obésité, hernie simple.

CARACTÉRISTIQUES

Une ceinture abdominale :

- 2 baleines dorsales et 3 frontales,
- Système de fermeture en double bandes auto-agrippantes avec système de passe-doigts pour une mise en place aisée,
- Matériau textile élastique et aéré,
- 1 patte hypogastrique amovible sur les modèles 18 et 25 cm.

COMPOSITION

Hauteur 18 et 25 cm : Nylon 50%, élasthanne 15%, polyester 15%, acier 10%, élastomère 5%, mousse 5%.

Hauteur 30 cm : Polyester 30%, nylon 25%, élasthanne 15%, rayonne (soie artificielle) 10%, polypropylène 10%, élastomère 5%, mousse 5%.

TVA : 5,5%

LPPR 18 cm : 56,50 € / 2168123

LPPR 25 cm : 70,61 € / 2111181

LPPR 30 cm : 77,67 € / 2111181 + 2x 201E03.01

Composants avec latex et caoutchouc naturel.

Prise de mesure : Tour de taille				
Taille	Tour de taille	Code Référent 13	ACL 7	Référence
Hauteur 18 cm				
2	70 - 85 cm	8435025937178	4722919	TR0311182
3	85 - 100 cm	8435025937185	4722925	TR0311183
4	100 - 115 cm	8435025937192	4722931	TR0311184
5	115 - 135 cm	8435025937208	4722948	TR0311185
6	135 - 150 cm	8435025937215	6010700	TR0311186
Hauteur 25 cm				
2	70 - 85 cm	8435025937222	4722865	TR0311252
3	85 - 100 cm	8435025937239	4722871	TR0311253
4	135 - 150 cm	8435025937246	4722888	TR0311254
5	115 - 135 cm	8435025937253	4722894	TR0311255
6	135 - 150 m	8435025937260	6010701	TR0311256
Hauteur 30 cm				
2	70 - 85 cm	8435025937277	4722807	TR0311302
3	85 - 100 cm	8435025937284	4722813	TR0311303
4	100 - 115 cm	8435025937796	4722836	TR0311304
5	115 - 135 cm	8435025937802	4722842	TR0311305
6	135 - 150 cm	8435025937819	6010702	TR0311306

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbets, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• **ABDOBELT®** Ceinture abdominale

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

Mise en place abdominale du produit :

1. Repérer l'étiquette «Abdobelt» pour positionner la ceinture dans le bon sens.

Positionner le plastron cicatriciel en fonction de la pathologie et/ou de l'emplacement de la plaie.

2. Maintenir le plastron cicatriciel à l'aide de votre main gauche.

3. Positionner en premier la bande auto-agrippante inférieure sur la partie opposée à l'aide du passe-doigts puis fixer. Ajuster la bande auto-agrippante supérieure de la même manière puis fixer.

Mise en place dans le cas de fracture des côtes :

4. Positionner la ceinture (hauteur 18 ou 25 cm) comme indiqué sur le visuel.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),

Rincer soigneusement.

Laisser sécher à l'air libre.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas javelliser.

Ne pas utiliser de détergent.

Conserver le produit à température ambiante.

