

CRYOPUMP®

Épaulière

Cryothérapie compressive



TVA : 5,5%

LPPR : 15,24 € / 6132607

DOMAINE D'APPLICATION

Post-opératoire, Traumatologie, Rééducation.

INDICATIONS

Post-opératoire, post-traumatique et capsulite.

CARACTÉRISTIQUES

Une épaulière :

- 2 sangles de positionnement et maintien.
- 1 sangle amovible.
- 1 valve (on/off).
- 2 compresses de gel.
- 1 pompe à air (+ tuyau) avec maintien auto-agrippant.
- 1 sachet de protection individuel et nominatif.
- 1 housse de protection cutanée.

COMPOSITION

Épaulière : nylon 32,5%, polyéthylène 35%, polyuréthane 25%, silicone 5%, PVC 2,5%.

Compresse de froid : nylon 50%, cellulose 50%.

Housse de protection cutanée : polyamide 80%, élasthanne 20%.

TAILLE UNIQUE MODÈLE BILATÉRAL

Taille	Code Référent 13	ACL 7	Référence
Unique	8435025924406	6028940	EB1212BIU

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)
 Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com
 Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbets, 35520 La Mézière (France).
 Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• **CRYOPUMP®** Épaulière

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirez le produit et consultez immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

Préparation de l'épaulière :

1. Vérifier que la pompe à air soit bien fixée à la valve et que la sangle amovible soit préfixée dans un anneau (IN/OUT).
2. Positionner la housse de protection cutanée puis la compresse de gel à l'emplacement prévu.

Note : les compresses doivent être placées au congélateur 2 h minimum avant la première utilisation.

Mise en place de l'épaulière :

3. Repérer le sens de l'épaulière à l'aide du logo et placer celle-ci sur l'épaule à traiter, en positionnant l'évidement au niveau de l'acromion.
 4. Fixer l'épaulière au niveau du bras en enroulant la sangle autour de ce dernier. Ajuster le niveau de maintien et fixer avec la zone auto-agrippante.
 5. Refermer l'épaulière en enroulant la sangle autour de l'épaule, et l'enfiler dans la boucle du côté IN. Ajuster le niveau de maintien et fixer avec la zone auto-agrippante.
 6. Vérifier que la valve soit sur la position ON et pomper jusqu'à obtention de la compression souhaitée. Si nécessaire, diminuer la compression en appuyant sur le bouton de la pompe.
 7. Refermer la valve en la basculant sur la position OFF.
- En fonction de la prescription médicale, renouveler l'opération en alternant avec la seconde compresse de gel et remplacer la première utilisée au congélateur pendant maximum 2h.

ATTENTION :

Pour les séances de cryothérapie, suivre rigoureusement les instructions de la prescription médicale. Effectuer des séances n'excédant pas 20 min et toujours les espacer d'une pause d'au moins 20 min. En cas de sensation inhabituelle, stopper immédiatement la séance de cryothérapie et consulter un professionnel de santé.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

