

Manchette RONDE

REF TP-15

Instruction d'utilisation

Description générale

Manchette anatomique en polyuréthane thermoplastique (TPU) - SANS LATEX. Elle est équipée de bandes élastiques ajustables et destinée à un unique patient.



Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages ou des blessures.

Avertissements

- Les manchettes peuvent uniquement être utilisées avec l'appareil TP1000.
- Consulter un professionnel de santé afin de prévenir les blessures causées par le froid ou la chaleur.
- Ne pas utiliser sur des patients inconscients.
- Ne pas utiliser chez les personnes présentant des troubles de la circulation, sauf si elles sont suivies par un professionnel de santé.
- Ne pas placer les manchettes sous le corps ni exercer de pression dessus.
- Ne pas serrer les manchettes trop fortement.
- Les manchettes sont destinées à un seul patient.
- Toujours vérifier l'absence de fuite avant utilisation.
- La température peut varier selon la température ambiante et la taille des manchettes.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Indications

À utiliser conjointement avec l'appareil TP1000.



Manchette x 1



Bande élastique x 2

Instructions d'utilisation



Etape 1



Etape 2



Tube de raccordement



1. Brancher le tube de raccordement à la manchette souhaitée (système LUER-LOCK) puis l'autre extrémité à l'appareil. Un clic audible permet de s'assurer que les connecteurs soient bien raccordés.
2. Positionner la manchette souhaitée sur la zone à traiter. Elle peut être directement appliquée sur la peau.
3. Ajuster la tension des bandes élastiques.

Spécification

- Matières : polyuréthane thermoplastique (TPU).
- Sans latex.

Élimination

Éliminer les manchettes conformément à toutes les directives nationales et internationales en vigueur relatives à la gestion des déchets.

Symboles d'étiquetage



Se référer au manuel d'utilisation / livret d'instructions



Symbole général d'avertissement / Attention



Ne pas réutiliser



Conserver au sec



Limite de température



Fabricant



Mandataire Européen



Fabriqué sans Latex



Date de fabrication



Dispositif médical



Référence



Numéro de lot



Date limite d'utilisation