

FIXQUICK

Sangle anti-épicondylite



DOMAINE D'APPLICATION

Rhumatologie, Prévention.

INDICATIONS

Épycondylite, épitrochléite, prévention des lésions sportives.

CARACTÉRISTIQUES

Une sangle anti-épicondylite :
- 1 insert auto-agrippant.

COMPOSITION

Caoutchouc naturel 30%, polyester 20%, nylon 20%, silicone 20%, polypropylène 5%, polyacétal 5%.

TVA : 20%

LPPR : Non remboursé

Prise de mesure : MTOUR DE L'AVANT-BRAS. Mesurer à 3 cm du coude.

Modèle bilatéral.

Taille	Tour de l'avant-bras (cm)	Code référent 13	ACL 7	Référence
1	22 - 27	8435025924468	6123314	EB1314BI1
2	27 - 32	8435025924475	6123315	EB1314BI2

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliaana Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbetais, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• Sangle anti-épicondylite FIXQUICK®

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :**1.** Tirer sur le disque de serrage pour le déverrouiller.

Enfiler la sangle anti-épicondylite autour de l'avant-bras, en dessous du coude, de manière à autoriser une flexion jusqu'à 90°.

Positionner l'insert viscoélastique sur la zone douloureuse (en fonction du traumatisme à traiter). Il doit se trouver au niveau du tendon de façon à exercer une pression adaptée.

2. Le disque de serrage possède 2 positions : «verrouillée» quand le disque est enfoncé au maximum et «déverrouillée» quand il est tiré au maximum. Le passage d'un état à l'autre est identifiable par un léger «clic». S'assurer que le disque est en position «verrouillée» et procéder au serrage. Tourner le disque dans le sens des aiguilles d'une montre et ajuster la tension à la compression souhaitée. Si le serrage est trop important, il peut être ajusté à tout moment en tournant le disque dans le sens opposé.

3. Pour retirer la sangle, déverrouiller le disque en tirant dessus afin et détendre les liens de serrage.

ATTENTION : Une compression excessive peut provoquer des interruptions de type vasculaire, c'est pourquoi nous vous conseillons de régler la compression jusqu'au degré optimal.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),

Rincer soigneusement.

Laisser sécher à l'air libre.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas javelliser.

Ne pas utiliser de détergent.

Conserver le produit à température ambiante.

