

Manchette BAS DU VISAGE

REF TP-10

Instruction d'utilisation

Description générale

Manchette anatomique en polyuréthane thermoplastique (TPU) - SANS LATEX.
Elle est équipée de bandes élastiques ajustables et destinée à un unique patient.




Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages ou des blessures.

Avertissements

- Les manchettes peuvent uniquement être utilisées avec l'appareil TP1000.
- Consulter un professionnel de santé afin de prévenir les blessures causées par le froid ou la chaleur.
- Ne pas utiliser sur des patients inconscients.
- Ne pas utiliser chez les personnes présentant des troubles de la circulation, sauf si elles sont suivies par un professionnel de santé.
- Ne pas placer les manchettes sous le corps ni exercer de pression dessus.
- Ne pas serrer les manchettes trop fortement.
- Les manchettes sont destinées à un seul patient.
- Toujours vérifier l'absence de fuite avant utilisation.
- La température peut varier selon la température ambiante et la taille des manchettes.
- Conserver dans un endroit frais et sec.

Indications

À utiliser conjointement avec l'appareil TP1000.

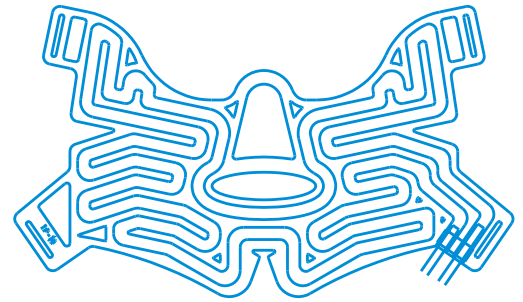

Manchette x 1



Bande élastique x 2


Instructions d'utilisation



Etape 1



Etape 2

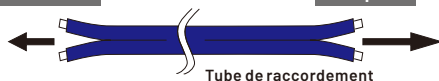

Tube de raccordement

1. Brancher le tube de raccordement à la manchette souhaitée (système LUER-LOCK) puis l'autre extrémité à l'appareil. Un clic audible permet de s'assurer que les connecteurs soient bien raccordés.
2. Positionner la manchette souhaitée sur la zone à traiter. Elle peut être directement appliquée sur la peau.
3. Ajuster la tension des bandes élastiques.



A



B



C

Spécification

- Matières : polyuréthane thermoplastique (TPU).
- Sans latex.

Élimination

Éliminer les manchettes conformément à toutes les directives nationales et internationales en vigueur relatives à la gestion des déchets.

Symboles d'étiquetage

- Se référer au manuel d'utilisation / livret d'instructions
- Symbole général d'avertissement / Attention
- Ne pas réutiliser
- Conserver au sec
- Limite de température
- Fabricant
- Mandataire européen
- Fabriqué sans Latex
- Date de fabrication
- Dispositif médical
- Référence
- Numéro de lot
- Date limite d'utilisation



MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Muenster,
Germany.



Dongguan Kaiser Technology Co.,Ltd.
No.6, 2nd Road, Sanjiang Industrial Block,
Hengli Town, Dongguan City, 523462
Guangdong P.R.China