

LOMBOBELT RENFORT®

Ceinture de soutien lombaire

DOMAINE D'APPLICATION

Rhumatologie, Rééducation.

INDICATIONS

Lombalgie commune aiguë à chronique, sciatique, cruralgie, hernie discale, déficience musculaire.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 baleines dorsales conformables,
- 2 baleines antérieures souples,
- Double rappel postural.

COMPOSITION

- Baleines dos : acier 100%.
- Baleines devant : polypropylène 100%.
- Auto-agrippant : polyamide 100%.
- Velours plastron : polyamide 100%.
- Tissu 3D intérieur : polyester 100%.
- Tissu élastique : élastomère 42%, polyamide 30%, polyester 28%.



TVA : 5,5%

LPPR 21 cm : 46,34 € / 2118674

LPPR 26 cm : 54,85 € / 2132289

Prise de mesure : TOUR DE TAILLE					
Hauteur ceinture	Taille	Tour de taille	Code référent 13	ACL 7	Référence
21 cm	1	60 - 75 cm	8435025944855	6394670	TR0238211
	2	75 - 90 cm	8435025944862	6394671	TR0238212
	3	90 - 105 cm	8435025944879	6394672	TR0238213
	4	105 - 120 cm	8435025944886	6394673	TR0238214
	5	120 - 140 cm	8435025945449	6394674	TR0238215
	6	140 - 160 cm	8435025945456	6394675	TR0238216
26 cm	1	60 - 75 cm	8435025945548	6394676	TR0238261
	2	75 - 90 cm	8435025946859	6394677	TR0238262
	3	90 - 105 cm	8435025946866	6394679	TR0238263
	4	105 - 120 cm	8435025946873	6394680	TR0238264
	5	120 - 140 cm	8435025946880	6394681	TR0238265
	6	140 - 160 cm	8435025948259	6394786	TR0238266

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbets, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• **LOMBOBELT RENFORT®** Ceinture de soutien lombaire

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

Préparation de la ceinture :

Modeler les baleines métalliques afin de les adapter à la courbure du dos. Détacher les bandes de rappel postural et étirer la ceinture.

1. Repérer l'étiquette tissu de la ceinture pour positionner la ceinture dans le bon sens.

Centrer la ceinture par rapport à votre colonne vertébrale en positionnant deux baleines postérieures de part et d'autre de votre colonne. Le bas de la ceinture doit se positionner sur la base du coccyx.

2. Étirer puis plaquer la ceinture sur votre ventre en la maintenant avec votre main gauche afin de positionner le premier réglage auto-agrippant. Positionner la partie droite de la ceinture avec le système de passe-doigts.

3. Refermer ensuite les bandes de rappel postural en utilisant les passe-doigts.

4. Ajuster le rappel postural si nécessaire.

Note :

Les sangles latérales de rappel postural peuvent être ajustées en les resserrant lors d'efforts intenses puis être relâchées durant les tâches ou périodes où le dos est moins sollicité.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),

Rincer soigneusement.

Laisser sécher à l'air libre.

Ne pas mettre au sèche-linge.

Ne pas javelliser.

Ne pas utiliser de détergent.

Conserver le produit à température ambiante.

