

COLLIER C1

Collier cervical souple



DOMAINE D'APPLICATION

Traumatologie, Rhumatologie, Rééducation.

INDICATIONS

Torticolis, cervicarthrose débutante.

CARACTÉRISTIQUES

- Forme anatomique permettant une bonne repose ou niveau des maxillaires et du larynx tout en évitant la rotation de la tête,
- Fixation auto-agrippante,
- Renfort pour un meilleur maintien,
- Tricot confortable anti-transpirant,
- Densité de mousse : 32 kg/m³,
- Une housse de protection amovible et facilement lavable.

COMPOSITION

Mousse : polyuréthane 100%.

Tissu (collier et housse de protection) : coton 100%.

Fixation auto-agrippante : polyamide 100% avec finition en polyuréthane.

TVA : 5,5%

LPPR : 9,25 € / 7132704

Prise de mesure : Hauteur de cou + Tour de cou

Mesurer la hauteur de cou, tête droite (regard vers l'horizon), prendre la mesure de la trachée au menton.

Mesurer le tour de cou, prendre la circonférence à la base du cou.

Taille	Hauteur de cou	Tour de cou	Code Référent 13	ACL 7	Référence
Pédiatrique	5 cm	25 - 29 cm	8435025933750	6034526	TR011650P
Enfant	6,5 cm	29 - 34 cm	8435025933767	6034527	TR011665E
1	7,5 cm	30 - 34 cm	8435025933774	6034545	TR0116751
2		35 - 39 cm	8435025933781	6034547	TR0116752
3		40 - 44 cm	8435025933798	6034548	TR0116753
4		45 - 50 cm	8435025933804	6034549	TR0116754
1	9,5 cm	30 - 34 cm	8435025933811	6034530	TR0116951
2		35 - 39 cm	8435025933828	6034531	TR0116952
3		40 - 44 cm	8435025933842	6034533	TR0116953
4		45 - 50 cm	8435025933866	6034535	TR0116954
1	10,5 cm	30 - 34 cm	8435025933712	6034538	TR01161051
2		35 - 39 cm	8435025933729	6034540	TR01161052
3		40 - 44 cm	8435025933736	6034541	TR01161053
4		45 - 50 cm	8435025933743	6034544	TR01161054

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Elia Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbets, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• **COLLIER C1** Collier cervical souple**⚠ PRÉCAUTIONS**

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Enfiler la housse de protection sur le collier.
2. Tête bien droite, positionner le menton au niveau de la section profilée.
3. Ajuster le maintien en prenant soin de ne pas gêner la respiration.
4. Fixer le collier à l'arrière du cou à l'aide de la fixation auto-agrippante.

NB : La housse de protection fournie avec le collier vous permettra de protéger ce dernier et ainsi éviter toutes taches de fond de teint, crèmes, lotions pour la barbe, etc. Amovible, elle peut être lavée et séchée rapidement, indépendamment du collier

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C).
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

