

L'ÉVOLUTIVE®

Ceinture de soutien lombaire



DOMAINE D'APPLICATION

Rééducation, Rhumatologie.

INDICATIONS

Lombalgie commune aiguë à chronique, sciatique, cruralgie, hernie discale, déficience musculaire.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 baleines dorsales flexibles,
- 1 système de fixation micro-injection avec 2 baleines avant flexibles,
- 1 système lombaire amovible.

COMPOSITION

- Velours : polyamide 72%, polyuréthane 28%.
- Système de fermeture : polyamide 100%.
- Monofilament : polyamide 40%, polyester 40%, élasthanne 20%.
- Micro crochet : polyamide 100%.
- Baleines dorsales : acier 100%.
- Baleines avant : polyoxyméthylène 100%.

TVA : 5,5%

LPPR 21 cm : 46,34 € / 2118674 // LPPR 26 cm : 54,85 € / 2132289

Prise de mesure : TOUR DE TAILLE

Disponible en deux hauteurs (21 ou 26 cm) et 2 coloris (noir ou gris).

Hauteur (cm)	Taille	Tour de taille (cm)	Code référent 13	ACL 7	Référence	Code référent 13	ACL 7	Référence
			COLORIS NOIR			COLORIS GRIS		
21	1	60 – 75	8435025947894	6394494	TR0239211	8435025948266	6394787	TR0240211
	2	75 – 90	8435025948167	6394495	TR0239212	8435025947771	6394490	TR0240212
	3	90 – 105	8435025948174	6394496	TR0239213	8435025947788	6394491	TR0240213
	4	105 – 120	8435025948181	6394497	TR0239214	8435025947795	6394492	TR0240214
	5	120 – 140	8435025948198	6394498	TR0239215	8435025947832	6394493	TR0240215
26	1	60 – 75	8435025948204	6394504	TR0239261	8435025947849	6394499	TR0240261
	2	75 – 90	8435025948211	6394505	TR0239262	8435025947856	6394500	TR0240262
	3	90 – 105	8435025948228	6394506	TR0239263	8435025947863	6394501	TR0240263
	4	105 – 120	8435025948235	6394507	TR0239264	8435025947870	6394502	TR0240264
	5	120 – 140	8435025948242	6394509	TR0239265	8435025947887	6394503	TR0240265

■ ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliaana Apdo de correos 49 - C.P. 46185 La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel. : +34 96 272 57 04 - Fax : +34 96 275 87 00 - E-mail : orto@orliman.com - Exportación : Tel. +34 9674 23 33 - E-mail : export@orliman.com - www.orliman.com

Distributeur : SM Europe / Orliman - 420574626 RCS Rennes. Pour toutes informations complémentaires, contacter : SM Europe / Orliman, 20 La Herbatais, 35520 La Mézière (France).

Tél. : +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - E-mail : orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Ce document est destiné exclusivement aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux de classe I selon la Réglementation (UE) 2017/745. Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant utilisation. Visuel non contractuel.

• L'ÉVOLUTIVE® Ceinture de soutien lombaire

⚠ PRÉCAUTIONS

Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit a tous les composants mentionnés ci-dessus. Contrôlez son état de manière régulière. Si vous constatez un défaut ou une anomalie, veuillez immédiatement en informer l'établissement de distribution.

Les matériaux qui constituent ce produit peuvent être inflammables. Veillez à ne pas exposer les produits à des situations susceptibles de provoquer leur inflammation. Si la situation venait à se produire, séparez-vous-en rapidement et utilisez les moyens appropriés pour l'éteindre. En cas de petites gênes produites par la sueur, nous recommandons l'utilisation d'une interface de coton pour séparer la peau du contact avec l'attelle. En cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles, retirer le produit et consulter immédiatement un professionnel de santé. Le produit doit être utilisé uniquement sur des peaux intactes. Le port de ce produit est contre-indiqué sur des plaies ouvertes ou cicatrices non protégées, gonflements ou rougeurs.

Les produits marqués du symbole  contiennent du latex de caoutchouc naturel et peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles au latex.

Les produits marqués du symbole  contiennent des composants ferromagnétiques qui requièrent des précautions particulières en cas de Résonance Magnétique ou de rayonnements associés à des procédures diagnostiques ou thérapeutiques.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé **LOT** de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

CONSEILS ET MISES EN GARDE

L'utilisation de ce produit est subordonnée aux indications. Bien que le produit ne soit pas à usage unique, il est recommandé d'en utiliser un par patient, seulement pour les fins indiquées dans la notice ou par votre professionnel de santé et de porter celui-ci sur peau complètement sèche en cas d'utilisation de produit à base d'alcool (ex. : gel hydroalcoolique), de pommades.

Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.

MISE EN PLACE

Pour une plus grande efficacité thérapeutique dans les différentes pathologies et pour prolonger la durée de vie du produit, il est important de choisir la taille la plus appropriée à chaque patient. Une compression excessive peut entraîner une intolérance. Si possible, il est conseillé de régler la compression jusqu'à un degré ferme mais confortable.

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être adapté, cette adaptation devra être effectuée par un professionnel de santé légalement formé à cet effet. Il devra s'assurer que l'utilisateur final ou la personne responsable de la mise en place du produit comprend correctement son fonctionnement et son utilisation.

Pour la mise en place du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

1. Repérer le logo Orliman® pour positionner la ceinture dans le bon sens. Centrer la ceinture par rapport à votre colonne vertébrale en positionnant deux baleines postérieures de part et d'autre de votre colonne. Le bas de la ceinture doit se positionner sur la base du coccyx.
2. Étirer puis plaquer la ceinture sur votre ventre en la maintenant avec votre main gauche.
3. Positionner la partie droite de la ceinture avec le système de passe-doigts et fixer avec la zone auto-agrippante.
4. Positionner le système lombaire amovible en fixant la partie « papillon » dans le dos avec la zone auto-agrippante. Ramener simultanément les 2 sangles de rappel postural vers l'avant, ajuster à la contention désirée et fixer avec les zones auto-agrippantes.

Note : Les sangles latérales de rappel postural peuvent être ajustées en les resserrant lors d'efforts intenses puis être relâchées durant les tâches ou périodes où le dos est moins sollicité.

ENTRETIEN :

Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
Rincer soigneusement.
Laisser sécher à l'air libre.
Ne pas mettre au sèche-linge.
Ne pas javelliser.
Ne pas utiliser de détergent.
Conserver le produit à température ambiante.

